

Mund-Nasen-Schutz

Geeignet für medizinisches Fachpersonal

Medizinischer Mund-Nasen-Schutz

- Medizinprodukt der Kategorie I
- Getestet gemäß EN 14683
- Verfügbar als Typ I, Typ II und Typ IIR
- Geeignet für medizinisches Fachpersonal und zum Tragen in der Öffentlichkeit
- Hoher Tragekomfort
- Extrem leicht



Der Mund-Nasen-Schutz reduziert die Verbreitung von Bakterien und Viren beim Sprechen, Niesen, Husten und Ausatmen. Die Maske besteht aus drei Lagen und ist aufgrund ihrer Flexibilität und Geruchslosigkeit angenehm zu tragen. Im Gegensatz zu den Atemschutzmasken fällt der Atemwiderstand beim Mund-Nasen-Schutz deutlich geringer aus, was ebenfalls zum Tragekomfort beiträgt.



Do not reuse



Attention, see instructions for use



Don't use when packaging damaged



See information supplied by the manufacturer



Temperature range of storage conditions



Maximum relative humidity of storage conditions

Normen und Zulassung

Der Mund-Nasen-Schutz wurde in einem akkreditierten Prüflabor der Firma SGS gemäß den Normen EN 14683 und EN 10993 getestet und als Medizinprodukt der Kategorie I klassifiziert.

Anwendung

1. Reinigen Sie die Hände gründlich
2. Die Innenseite möglichst nicht durch Berührung kontaminieren
3. Ziehen Sie die beiden Gummibänder über die Ohren
4. Platzieren Sie die Maske richtig über Mund, Nase und Wangen, sodass die Ränder möglichst eng anliegen
5. Waschen Sie die Hände nach dem Abnehmen gründlich
6. Maske in verschlossener Tüte entsorgen

Hinweise

- für den einmaligen Gebrauch - Reinigung nicht möglich
- Eine durchfeuchtete Maske umgehend abnehmen und ggf. austauschen.

Leistungsanforderung EN 14683

Prüfung	Typ I	Typ II	Typ IIR
Bakterielle Filterleistung (BFE), (%)	≥ 95	≥ 98	≥ 98
Druckdifferenz (Pa/cm ²)	< 40	< 40	< 60
Druck des Spritzwiderstandes (kPA)	-	-	≥ 16,0
Mikrobiologische Reinheit (KBE/g)	≤ 30	≤ 30	≤ 30

Technical Datasheet